

# **MonoMouse**

**Powiększalnik elektroniczny**



**Szybki przewodnik**



Ostatnia aktualizacja 25.09.2012

**Wytwórca:**

**Bierley.com Limited**

Crossing Cottage,  
Wyfordby, LE14 4RY, UK  
Tel +44 1664 480549  
Fax +44 845 2802281

**Dystrybutor:**

**ALTIX Sp. z o. o.**

Ul. Chlubna 88  
03-051 Warszawa  
Tel. (22) 676 90 30, 676 90 95  
Fax. (22) 676 58 22  
[www.altix.pl](http://www.altix.pl)

**Powiększalnik przeznaczony jest dla osób cierpiących na zwyrodnienie plamki żółtej, jaskrę, retinopatię barwnikową, zaćmę oraz inne schorzenia powodujące problemy z widzeniem.**

**Sposób użytkowania:**

- 1. Wyjmij MonoMouse z opakowania ( nie wyrzucaj opakowania – może się przydać, gdy np. będziesz wyjeżdżać na wakacje).**
- 2. Rozwiń przewód zasilający i podłącz zasilacz do gniazdka w pobliżu telewizora, z którego będziesz korzystać, używając MonoMouse.**
- 3. Upewnij się, że telewizor jest wyłączony, a następnie podłącz powiększalnik do telewizora ( wtyk: SCART ), bądź komputera (wersja USB).**
- 4. Umieść MonoMouse na tekście, który chcesz przeczytać i włącz urządzenie naciskając niebieski klawisz.**
- 5. Włącz komputer, bądź telewizor (telewizor przełącz na odpowiedni kanał - AV 1, AV 2).**
- 6. Usiądź wygodnie i powoli przesuwaj MonoMouse nad tekstem bądź obrazem, który będzie teraz wyraźnie wyświetlony na ekranie telewizora!**

**UWAGA:**

Nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać do upoważnionych punktów odbioru. W celu uzyskania informacji o metodach utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Złomując we właściwy sposób, unikamy negatywnego wpływu na środowisko i ludzi.

